

メディオンラックご購入ありがとうございます

モニターアーム取り付けおよび移動用アームの取り付けについてご説明致します。

アームセットの中には

- | | |
|---------------------|----|
| 1. モニター取り付けアーム一式 | X1 |
| 2. 12cm アルミ製補強チャンネル | X1 |
| 3. 移動用アーム金具 | X1 |
| 4. 天板補強スチール板 | X1 |



取り付け方法

- 最初にアルミ補強チャンネルを天板との間に挟みこんでください。
両面テープが付いていますのでそれをはがして取り付けてください。



- 天板補強板を4本のねじで取り付けてください。
レンチは13mmです。黒いゴムが貼り付けてある場合ははがしてください。
- 移動用アームを4mmの六角ネジで固定してください。
- 最後にモニターアームを取り付けてください。
レンチはインチ規格ですので、付属のレンチをご使用ください



アーム昇降強度調整

首振り硬さ調整

取り付けネジ



株式会社 **ルキナ**

〒224-0041

横浜市都筑区仲町台 1-32-12 幸喜第二ビル 203

電話 045-941-6305 FAX 045-941-6315

URL: <http://www.lucina-inc.com>